

### Descripción

El Kit de prueba rápida con IgG/IgM para el COVID-19 (sangre entera/suero/plasma) es un ensayo inmunocromatográfico en fase sólida para la detección rápida, cualitativa y diferencial de anticuerpos IgG/IgM contra el nuevo COVID 2019 en sangre entera, suero o plasma humanos. Este test solo proporciona un resultado preliminar. Por lo tanto, cualquier muestra adquirida con el KIT DE PRUEBA RAPIDA CON IgG/IgM para el COVID-19 (sangre entera, suero, plasma) debe ser confirmada con métodos de prueba alternativos y resultados clínicos. La sensibilidad de este kit es del 96.88%, la especificidad es del 100%, la tasa de falsos positivos es del 0%, la tasa de falsos negativos es del 3.12% y la tasa de conformidad total es del 99%.

### Contenido del kit

- 1 Panel de Prueba
- 1 Lanceta (Solamente para punción)
- 1 Alcohol Pad
- 1 Suero Diluyente
- 1 Pipeta

### Material requerido pero no suministrado

- Temporizador
- Guantes Desechables

### Almacenamiento y estabilidad

Almacenar a temperatura ambiente o refrigerado (2 – 30°C). El dispositivo de prueba es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada. El dispositivo de prueba debe permanecer en su bolsa sellada hasta su uso. No congelar. No utilizar posteriormente a la fecha de caducidad. No utilizar si la bolsa está dañada o rota. Test solo para un uso.

### Instrucciones de uso

Permira que el Kit de prueba, la muestra y/o los controles se equilibren a temperatura ambiente (15 – 30°C) antes de la prueba.

1. Retire el kit de la bolsa sellada y úselo dentro de una hora. Se obtendrán mejores resultados si es utilizado de forma inmediata.
2. Coloque el kit de prueba en una superficie limpia y nivelada.
3. Proceso.
  - 3.1. Masajear la yema del dedo al cual se aplicará la puncion
  - 3.2. Desinfectar con alcohol pad.
  - 3.3. Pinche con la lanceta la yema de su dedo
  - 3.4. Limpie la primera gota de sangre con un algodón limpio.
  - 3.5. Use la pipeta para succionar las gotas de sangre.
  - 3.6. Añada 10µL de sangre al pocillo de muestra (A) del casete de la prueba (llenar hasta la línea negra indicada en la pipeta).
  - 3.7. Añada 2 gotas (aproximadamente 60µL) de suero diluyente al pocillo de buffer (B) inmediatamente y espere el tiempo indicado.
4. Espere la aparición de la(s) línea(s) de color. El resultado debe leerse a los 10 minutos. Los resultados positivos pueden ser visibles tan pronto como a los 2 minutos.  
**NO interprete el resultado después de 15 minutos.**




# Ficha de Producto


El Kit de prueba rápida con IgG/IgM para el COVID-19

**SAFETY**<sup>®</sup>

store.cl

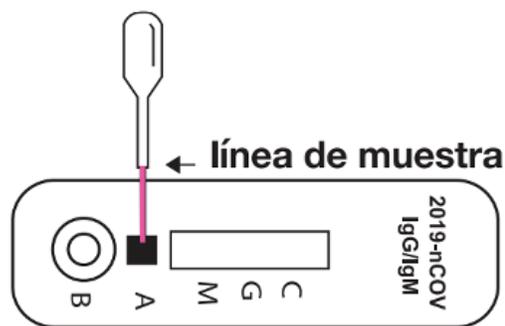

10uL de Sangre Completa

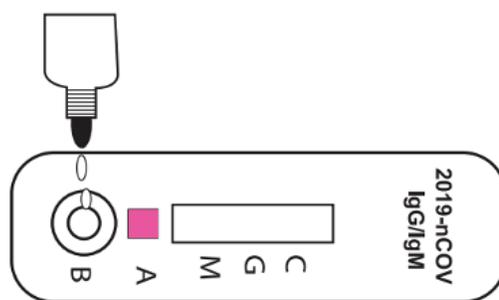


2 gotas de buffer



Positivo



Negativo

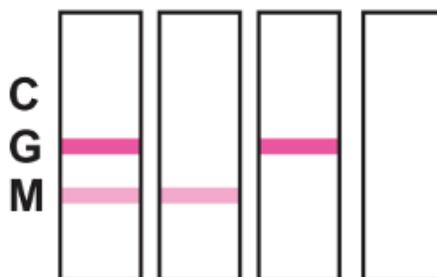

Nulo